

簡単操作 迅速測定
非接触
スマート検温！



非接触赤外線体温計

商品名 ヒュービディック非接触赤外線体温計
管理医療機器【225AFBZX00013000】

ス マ ー ト

サ ー モ

SMART THERMO

検温時間が速い！

- 検温時間はスタート時 2 秒以内
連続使用時 0.5 秒
- 医療現場に最適

清潔安全！

- 非接触なので感染リスクの低減に

かんたん検温！

- 誰にでもできるボタン操作
- お子様や御高齢者など腋窩での
検温がむずかしい方に最適

SANKO

株式会社 三紅ヘルスケア
SANKO HEALTH CARE

持ちやすく検温しやすいスティックタイプ。 非接触赤外線体温計『SMART THERMO』



front


ボタン説明

START : 電源、測定ボタン

MODE : モード切替ボタン

MEM : メモリ参照ボタン

(()) : 発音切換えボタン

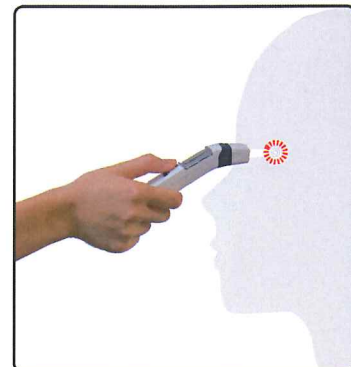

基本操作：体温測定

1. 『START』または『MODE』ボタンを押し、電源を入れます。




希望小売価格

15,800 円 (税抜)



機器の保証期間は、ご購入から一年間になります。
アフターサービスのお問い合わせは製造販売元
ヒュービディックジャパン株式会社まで。

2. ディスプレイに マーク (体温計モード) が表示され、検温スタートになります。

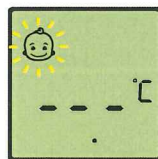

3. こめかみ付近から 2~3cm 離し、『START』ボタンを押します。計測終了を知らせる「ピー音」が鳴り測定温度がディスプレイに表示されます。



1分間ボタン操作が無い場合に、電源は自動的に OFF になります。

※その他、ご使用には環境に応じた注意点ががあります。

【製品仕様】

商品名 ● ヒュービディック非接触赤外線体温計

承認番号 ● 第225AFBZX00013000号

クラス分類 ● 管理医療機器クラスII

測定方式 ● 赤外線測定、非接触測定

周囲温度範囲 ● 15~40℃、湿度95%以下、気圧700~1060hPa

測定距離 ● 対象物(こめかみ)の中心から2~3cmの距離

測定範囲 ● 体温計モード：34.0~42.5℃

温度計モード：15.0~60.0℃

最大許容誤差 ● 体温計モード：±0.3℃(34.0~42.5℃)

温度計モード：±0.3℃(22.0~42.5℃)

±1.0℃(15.0~21.9、42.6~60.0℃)

測定時間 ● スタート時2秒以内

表示単位 ● 0.1℃

メモリ機能 ● メモリ保存最大32件(体温計モードのみ保存)

バックライト機能 ● 測定後3秒間点灯、自動消灯

省電力機能 ● 使用後1分経過で自動電源遮断

付属品 ● 本体(1)、本体カバー(1)、取扱説明書(1)、

添付文書(1)、単4形乾電池(2)

定格電源電圧 ● 直流電源3V(単4形1.5V乾電池2個)

サイズ ● 152mm(W) x 36mm(D) x 37mm(H)

重量 ● 68g(電池含まず)

※予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈製造元〉

HuBDIC HuBDIC.CO.,LTD.
Human Body Design Idea Company

〈製造販売元〉

ヒュービディックジャパン株式会社

〈販売元〉

SANKO

株式会社 三紅ヘルスケア

東京本社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-5-6

平河町 SD ビル 6F

TEL 03-6256-8131

〈ご用命は〉