

HuBDIC

非接触赤外線体温計

スマートサーモ HFS-1500

【管理医療機器 304AFBZX00102000】

SMART THERMO HFS-1500



- ☑ 非接触式のため、早くて安全な体温測定
- ☑ 高精度な体温測定
- ☑ 携帯性に優れたスリムデザイン



非接触
体温測定



高精度



2秒
クイック測定



体温測定値
保存100件



カラー
バックライト

スマートサーモは様々な温度を測定できます。

体温以外の温度測定にご使用いただけます



入浴温度測定



離乳食温度



哺乳瓶温度

反転液晶カラーバックライト表示



22°C～37.3°C 37.4°C～37.9°C 38°C以上

SANKO

株式会社 三紅ヘルスケア

SANKO HEALTH CARE

持ちやすく検温しやすいスティックタイプ。 非接触赤外線体温計『SMART THERMO』



front


ボタン説明

START : 電源、測定ボタン


MODE : モード切替ボタン

MEM : メモリ参照ボタン

(()) : 発音切換えボタン

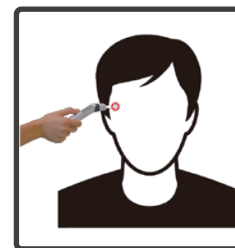

基本操作：体温測定

- 『START』または『MODE』ボタンを押し、電源を入れます。
- ディスプレイに  マーク（体温計モード）が表示されると検温が可能になります。
- こめかみ付近から2～3cm 離し、『START』ボタンを押します。計測終了を知らせる「ピー音」がなり測定温度がディスプレイに表示されます。
1分間ボタン操作が無い場合に、電源は自動的にOFFになります。



希望小売価格

15,800 円 (税抜)



機器の保証期間はご購入から一年間になります。
アフターサービスのお問い合わせはヒュービディックジャパン株式会社まで。

※その他、ご使用には環境に応じた注意点ががあります。

商品名	スマートサーモ HFS-1500	表示温度範囲	22℃～43℃ (体温計モード)
認証販売名	非接触赤外線体温計 1500		0℃～100℃ (温度計モード)
一般の名称	皮膚赤外線体温計	保管温度範囲	-20℃～50℃
医療機器認証番号	304AFBZX00102000	表示温度方式	実測及び補正温度方式
医療機器分類	管理医療機器	電池	アルカリ単4乾電池2本(DC3V)
測定部位	こめかみ部	重量	59g (本体)
使用温度範囲	5℃～40℃	商品内容	本体1セット, 取扱説明書, 添付文書
最小表示単位	0.1℃		単4乾電池2本
最大許容誤差	±0.2℃ (36℃～39℃)		

SANKO

【販売元】株式会社三紅ヘルスケア
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-6
平河町SDビル 6F
TEL : 03-6256-8131 FAX : 03-6256-8132
受付時間 9:30～17:30 (土日祝祭日除く)

HuBDIC

【製造販売元】
ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507-6
【製造元】
HuBDIC Co.,Ltd (大韓民国)

〈ご用命は〉